

قابل توجه پرستاران محترم، لطفا پس از اتمام کار دستگاه اقدامات ذیل را انجام دهید:

۱. پس از بازگشت خون به بدن بیمار، قبل از خاموش کردن دستگاه در صورت استفاده از پمپ سرم دستگاه، سرم را از آن خارج نمایید.

۲. ابتدا دستگاه را به صورت نرم افزاری خاموش کرده و پس از شنیدن صدای آلارم به صورت سخت افزاری (کلید پشت دستگاه) خاموش نمایید.

۳. دو شاخه برق دستگاه را از پریز جدا نمایید.

۴. کیسه محلول و ضایعات را از دستگاه جدا نمایید.

۵. ست دستگاه را به صورت کامل از روی دستگاه بردارید. (ابتدا پمپ ها را باز کنید سپس ایزولاتور ها را جدا کنید)

۶. در صورت ریختن مایعات بر روی دستگاه سریعا آن را خشک نمایید.

۷. هنگام حرکت دادن دستگاه حتما از قفل نبودن چرخ ها مطمئن باشید.

۸. پس از اتمام کار دستگاه را به مکان مناسب انتقال دهید.

۹. در صورت بروز هر گونه مشکل با شرکت ارمغان سلامت کیش به شماره ۰۲۱-۴۹۲۰۵۰۰۰ تماس بگیرید.

## راهنمای کاربری سریع دستگاه CRRT

۱. با زدن کلید روشن / خاموش در پشت دستگاه، آن را روشن کنید.
  ۲. ست را بر روی دستگاه به صورت صحیح جایگذاری نمایید.
  ۳. در صفحه TREATMENT LIST نوع درمان مورد نظر را انتخاب و گزینه Next را بزنید.
  ۴. وزن بیمار را وارد کرده و گزینه Next را بزنید.
  ۵. در صفحه Rinsing، گزینه Start را انتخاب نمایید.
  ۶. پس از اتمام شستشوی ست، در صفحه Rinsing end، گزینه TREATMENTS را انتخاب کنید.
  ۷. جهت اتصال ست به بیمار، گزینه CONNECT PATIENT را انتخاب نمایید.
  ۸. پس از اتصال بیمار به دستگاه، گزینه GO TO TREATMENT را بزنید.
  ۹. در صفحه Treatment با انتخاب گزینه START TREATMENT درمان مورد نظر آغاز می شود.
  ۱۰. پس از اتمام درمان، گزینه END TREATMENT را انتخاب و تایید نمایید.
  ۱۱. گزینه BLOOD RETURN را جهت بازگشت خون به بیمار انتخاب نمایید و پس از جدا کردن ست شریانی (قرمز) از بیمار، با انتخاب گزینه Start blood pump، خون به بیمار برمی گردد.
  ۱۲. پس از بازگشت خون به بدن بیمار گزینه Disconnect را انتخاب نمایید.
  ۱۳. در ادامه، پس از جدا کردن ست وریدی (آبی) از بیمار، گزینه End Treatment را انتخاب نمایید.
  ۱۴. در صفحه Final، با انتخاب گزینه Turn Off و تایید آن، دستگاه از نظر نرم افزاری خاموش می شود. پس از چند ثانیه، دستگاه شروع به آلارم زدن کرده که در نهایت با زدن کلید پشت دستگاه، از نظر سخت افزاری نیز خاموش می شود.
- تذکره ۱- در صورت ریختن هر گونه مایع روی دستگاه (مانیتور و سنسورها و پمپ ها) سریعاً مایع را خشک نمایید.
- تذکره ۲- از سوراخ کردن ایزولاتورهای فشار بپرهیزید و در صورت خیس شدن آن، باید آن را با ایزولاتور جدید جایگزین نمایید.